




Inhalt


Liquor



3x Sterile Polypropylen-Röhrchen

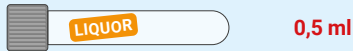

1x Vacuette Fluorid für
Lactat-/Glucose-Bestimmung
aus Liquor

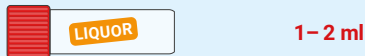

1x EDTA-Röhrchen für
Zellzahl-Bestimmung

Blut / Serum



2x Serum-Versand-Röhrchen



1x Vacuette Fluorid für
Lactat-/Glucose-Bestimmung
aus Plasma

Vorgehen

- Liquor und Blut zum **gleichen Zeitpunkt** entnehmen.
- Abnahme von insgesamt 7 – 10 ml Liquor.
Den Liquor gleichmässig auf die drei sterilen Polypropylen-Röhrchen verteilen.
Reihenfolge der Entnahme auf den Röhrchen bitte so vermerken: 1., 2., 3.
- Die Serum-Versand-Röhrchen **zwingend** mit je 3 – 4 ml Serum füllen.
- Zytologie sollte innerhalb 1 Stunde nach der Entnahme im Labor sein.
- Auftragsformular «Medikamente / Liquor» verwenden.

Probenversand

Bitte Notfallkurier anfordern. Falls der Termin bereits bekannt ist, Abholung voranmelden.