





Inhalt

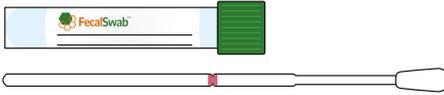


1x FecalSwab™ Abstrich-Set «Cary-Blair»
mit Röhrchen und Abstrichtupfer

Vorgang

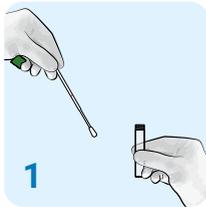


1

Röhrchen mit Patienten-
namen und Entnahme-
Datum beschriften. Den
Abstrichtupfer am hinte-
ren Ende aus der Verpa-
ckung nehmen und den
Rektalabstrich durch-
führen.

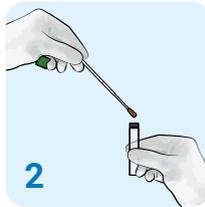


2

Jetzt den Abstrichtupfer
in das FecalSwab™ Röhr-
chen einführen.

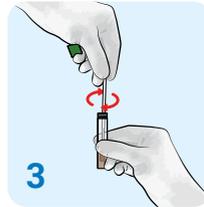

3

Abstrichtupfer mehrmals
im Röhrchen drehen, bis
die Flüssigkeit trüb ist.

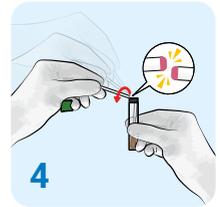

4

Den Abstrichtupfer im
Röhrchen belassen und
an der rot markierten
Stelle abbrechen. An-
schliessend mit Deckel
gut verschliessen.



WICHTIG

- Nur für Stuhl-Panel-Kombinationen geeignet!
- Bitte Röhrchendeckel fest zudrehen