




## Inhalt

### Liquor



4x Sterile Polypropylen-Röhrchen

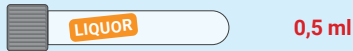

1x Vacuette Fluorid für  
Lactat-/Glucose-Bestimmung  
aus Liquor

### Blut / Serum



2x Serum-Versand-Röhrchen



1x Vacuette Fluorid für  
Lactat-/Glucose-Bestimmung  
aus Plasma

## Vorgehen

- Liquor und Blut zum **gleichen Zeitpunkt** entnehmen.
- Abnahme von insgesamt 8 – 12 ml Liquor.  
Den Liquor gleichmässig auf die vier sterilen Polypropylen-Röhrchen verteilen.  
Reihenfolge der Entnahme auf den Röhrchen bitte so vermerken: 1., 2., 3., 4.
- Die Serum-Versand-Röhrchen **zwingend** mit je 3 – 4 ml Serum füllen.
- Zytologie sollte innerhalb 1 Stunde nach der Entnahme im Labor sein.
- Auftragsformular «Medikamente / Liquor» verwenden.

## Probenversand

Bitte Notfallkurier anfordern. Falls der Termin bereits bekannt ist, Abholung voranmelden.