




Inhalt



1x Analytica Box

2x Portagerm® pylori mit Agar

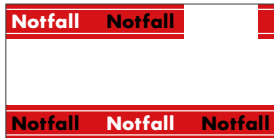

1x Notfall-Versandtüte

Für den kulturellen Nachweis von *Helicobacter pylori* inkl. Resistenzprüfung aus Magenbiopsien.

Transportmedium bis kurz vor der Entnahme im Kühlschrank lagern.

Vorgehen

- 1 Transportmedium auf Raumtemperatur bringen.
- 2 Röhrchen mit Patientendaten und Lokalisation beschriften.
- 3 Biopsie direkt in das Transportmedium einbringen und leicht in den Agar drücken (ca. 2mm tief).
- 4 Verpacken Sie die Ampullen (geschützt in der Analytica Box) und das Auftragsformular in die beigelegte Notfall-Versandtüte.
- 5 Verlangen Sie einen **Notfallkurier**, Lagerung und Transport bei Raumtemperatur.
- 6 Beachten Sie, dass der Auftrag am **Tag der Entnahme** bei uns im Labor eintreffen muss.

Annahme Portagerm® pylori: Montag–Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr